

G-Files™ G1 G2

Protocole Protocol Protokoll

K-File
(MMC)
up to N°10



G1



LT / WL / AL

G2



*et/ou
and/or
und/oder*



LT / WL / AL

Your Endo Specialist™



G1


N°12 3%

L 21 - 25
- 29 mm

G2

N°17 3%

L 21 - 25
- 29 mm

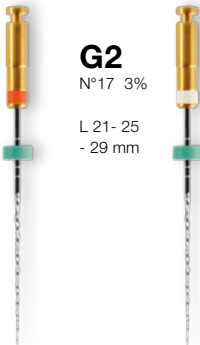

Your Endo Specialist™

FR

Vitesse de rotation : 400 tr/min - Couple maxi : 1,2 N.cm

Dynamique opératoire : mouvement de descente lent en un passage et sans pression.

→ En cas de résistance trop élevée, retirer la lime du canal et recommencer.

- Ensuite, utiliser Revo-S™ ou tout autre système de préparation canalaire.

EN

Rotation speed: 400 rpm - Maxi torque: 1.2 N.cm

Operative dynamics: Slow and unique downward movement in a free progression and without pressure.

→ In case of too much resistance, withdraw the file from the canal and restart the movement.

- Then use Revo-S™ or any other system for root canal cleaning and shaping.

DE

Motorgeschwindigkeit: 400 U/min - Max. Drehmoment: 1.2 N.cm

Arbeitsbewegung: Langsame und gleichmäßige Abwärtsbewegung in den Wurzelkanal ohne Druckausübung.

→ Bei zu großem Widerstand die Feile aus dem Kanal entfernen und die Arbeitsbewegung wiederholen.

- Verwenden Sie dann Revo-S™ oder ein anderes System zur Wurzelkanalaufbereitung.

0 5 10 15 20 25 30 mm

www.micro-mega.com

Classics & InGeT®

